

Instruks vedrørende: AED/Hjertestarter	
Målgruppe	Alle medarbejdere inklusive vikarer der benytter hjertestarter
Formål	At der gives information om, når maskinen er væk og retur igen. At der tages hånd om service.
Mål	At man ved, hvad der skal gøres før og efter brug af hjertestarter
Instruks	AED står for Automatisk Ekstern Defibrillator. Det er et apparat, som kan give elektrisk stød ved hjertestop. Det består af maskinen og elektroder, som sættes på den tilskadekomnes krop. Hjertes rytme registreres, så hjertestarteren kan vurdere, hvornår det er optimalt at afgive stød.
Vejledning	Alle kan benytte en hjertestarter. Når maskinen åbnes, vil den med det samme fortælle, hvad der skal gøres. Den fortsætter under hele genoplivningsforløbet. Den instruerer i: <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan, elektroderne sættes på kroppen • Hvornår, der skal gives kunstigt åndedræt • Hvornår, der skal gives hjertemassage • Hvornår, der skal stødes.
Efter brug	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ansvarshavende/sygeplejerske sender "alle mail" ud, hvis hjertestarter har været i brug og/eller går med ambulancen og derfor ikke kan benyttes ➤ Hjertestarter lægges på administrationskontoret, hvis den ikke går med ambulancen ➤ Administrationen kontakter Trygfonden på tlf. 70222252, som deaktiverer hjertestarteren på www.hjertestarter.dk ➤ Administrationen bestiller nyt batteri og elektroder hos Falck på tlf. 70256611 ➤ Administrationen sætter nyt batteri og lægger elektroderne i tasken og sætter tasken retur i hjertestarterskabet i gården ➤ Administrationen kontakter Trygfonden på tlf. 70222252, som aktiverer hjertestarteren på www.hjertestarter.dk (der skal oplyses om elektrodernes udløbsdato)) ➤ Administrationen sender en "alle mail" med besked om, at hjertestarteren er på plads igen
Service	Vi har en serviceaftale med Falck, hvor de én gang årligt tilser maskinen.
Lovgrundlag	Ref. Sygeplejerskemøde d. 13. april 2016 pkt. 6
Referencer	Falck's hjemmeside
Kilder	