

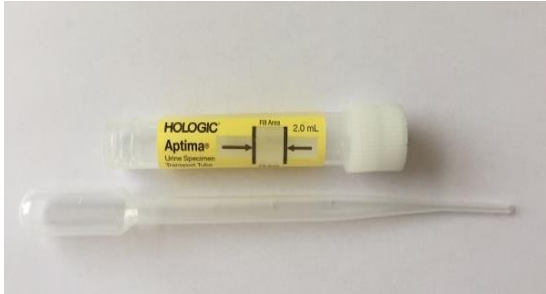




<p>Aptima Multitest kit</p>	<p>Til undersøgelse for Chlamydia og Gonokokker.</p> <p>Kvinder Vaginal selvtagning</p> <p>Varenr. PRD-03546</p>	
<p>Aptima Unisex specimen collection</p>	<p>Til undersøgelse for Chlamydia og Gonokokker.</p> <p>Kvinder & mænd Cervix, vagina, urethra, rectum, svælg og øjne</p> <p>Varenr. 301041</p>	
<p>Aptima Urine specimen collection kit</p> <p>Med engangspipette og prøverør til urin</p>	<p>Til undersøgelse for Chlamydia og Gonokokker.</p> <p>Mænd Urin</p> <p>Varenr. 301040</p>	
<p>ESwab (HVID) med alm. pødepind</p>	<p>Dyrkning og resistens samt virus PCR-analyser</p> <p>Varenr. 220245</p>	
<p>Urin-Monovette m. borsyre</p> <p>Prøverør med opsugnings-spids</p>	<p>Forsendelse af urin til dyrkning</p> <p>Varenr. 10.253</p>	

<p>ESwab (GRØN) med tynd podepind (minitip + fleksibel)</p>	<p>Samme anvendelse som eSwab, men med mindre tip og fleksibel podepind</p> <p>Varenr. 220246</p>	
<p>FecalSwab med alm. podepind orange skruelåg</p>	<p>Til rektalpodninger</p> <p>&</p> <p>Helicobacter Pylori (til denne skal indsendes fæces svarende til en ært)</p> <p>Varenr. 220258</p>	
<p>Ekspektoratdåse med plasticcontainer</p>	<p>Ekspektorater</p> <p>Varenr. AL-450001-s</p>	 <p>1. Tag den inderste æske ud 2. Skru det hvide låg af og placer ophostet prøve i beholderen. 3. Skru låget på igen. 4. Placer ærten i den inderste beholder i den yderste.</p>
<p>Forsendelsescontainer til 2 objektglas</p> <p>&</p> <p>Objektglas, facetslebne afr. hjørner</p>	<p>Anaftryk for børneorm laves med klar tape, som sættes på objektglas med klæbesiden nedad.</p> <p>OBS – objektglas og forsendesetui bestilles separat</p> <p>Forsendelsesetui Varenr. 86.972</p> <p>Objektglas Varenr. 1510.1010</p>	

<p>Fæcesrør</p> <p>Prøverør med beskyttelsesrør</p>	<p>Fæces til undersøgelse for parasitter samt til forsendelse af kvitte-rede orm/ormeled til identifikation</p> <p>Varenr. 40080</p>	
<p>EasySampler Basic</p>	<p>Sættes på toilettet – til opsamling af fæces</p> <p>Varenr. 130100</p>	
<p>Dermapak til hudsvampeprøver</p> <p>Dermapak papkuvert i plastpose</p>	<p>Hudsvampe til mikroskopi og dyrkning</p> <p>Varenr. DMK201</p>	
<p>Sarstedt-centrifugerør</p> <p>Vigtigt Sæt den lille stregkode på langs af røret – røret skal ligges i en lille pose inden den ligges i skumblokken</p>	<p>Hudsvampe DNA/RNA til dermatophyt PCR-analyse</p> <p>Varenr. 72.694.005</p>	
<p>Centrifuge tube w/cap</p>	<p>Sterilt glas med skrue-låg</p> <p>Varenr. 391-8512</p>	

<p>Kaliumhydroxid</p>	<p>Kaliumhydroxid-R 10% 20 ml</p> <p>Varenr. 861934</p>	
<p>Forsendelsesæske til 6 rør, flamingo</p>	<p>Flamingobakke til forsendelse af op til 6 prøverør</p> <p>OBS - koverter bestilles separat</p> <p>Varenr. 1683.0005</p>	
<p>Boblekuvert, 18x26 cm Mrk. Hvidovre</p>	<p>Præfrankeret boble- kuvert til forsendelse af prøver</p> <p>OBS - flamingobak- ker bestilles separat</p> <p>Varenr. P1685.1826H</p>	
<p>Lynlåspose 170x230 mm m/skrivefelt</p>	<p>Lynlåspose til bl.a. sarstedt-centrifugerør inden disse placeres i de grønne skumblokke</p> <p>Varenr. 7782-1</p>	